



SPRAY SURODORANT DÉSINFECTANT

Parfum Pomme

Le SPRAY SURODORANT
DÉSINFECTANT Pomme est destiné
à la **désinfection du matériel et
des surfaces.**



CONDITIONNEMENT

12 flacons — 1 L

INDICATIONS

Désinfection et désodorisation du matériel et des surfaces. Parfum pomme. Désinfection des équipements et matériels : mobilier, literie, brancards, véhicules de soins, sanitaires, chaussures...

MODE D'EMPLOI

Solution prête à l'emploi.

Pour obtenir une meilleure efficacité :

- utiliser le SPRAY SURODORANT DÉSINFECTANT sur des surfaces propres
- pulvériser uniformément sur la surface à traiter afin d'obtenir un film antimicrobien homogène.

COMPOSITION QUALITATIVE

Ethanol (327,4 mg/g), chlorure de didécyltriméthylammonium, N-3-aminopropyl N-dodécylpropane 1.3-diamine, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, parfum de synthèse.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Liquide limpide incolore

Densité à +20°C : ≈ 0,95

pH du produit pur à +20°C : ≈ 5,5

Stockage entre +5°C et +25°C

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 1040, NF T 72-171, NF T 72-190, actif sur B.K.

Fongicide : EN 1275 (Candida albicans)

Actif sur les virus HIV-I, HBV, Rotavirus, Herpès virus et BVDV (virus modèle HCV)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Inflammable - Respecter les précautions d'emploi (établies selon la Directive Européenne 99/45/CE).

Information disponible sur la Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette.



Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • France
Tél. +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68 • www.anios.com

SPRAY SURODORANT DÉSINFECTANT

Parfum Pomme



Les 8 points forts du SPRAY SURODORANT DÉSINFECTANT Parfum Pomme

- Produit à la fois désinfectant et désodorisant.
- Ne tache pas.
- Ne laisse pas de traces.
- Élimine les sources d'odeurs désagréables dues au développement microbien.
- Large spectre désinfectant.
- Pulvérisation homogène.
- Buse réglable.
- Ne contient pas d'aldéhyde.




Bactéricide : EN 1040, NF T 72-171, NF T 72-190,
actif sur B.K.

Activité fongicide sur *Candida Albicans* EN 1275.
Actif sur HIV-I, HBV, Rotavirus, Herpès virus et
BVDV (virus modèle HCV).

DOSAGE

Prêt à l'emploi.

APPLICATIONS

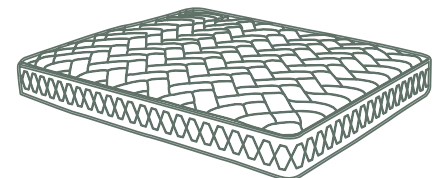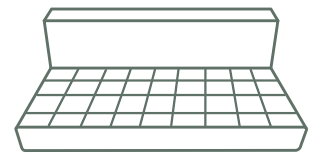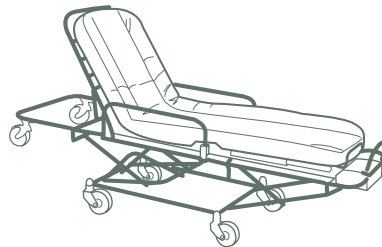

MÉTHODE



1. Pulvériser sur une
surface propre.



2. Laisser agir 5 à
15 mn.



3. Essuyer le surplus
si nécessaire.

Team Pro
Une Équipe de Spécialistes

Laboratoires
ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • FRANCE
Téléphone +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68 • www.anios.com